千如電子集團醫療(MD)口罩檢驗方法及標準

ATEC-ABC Medical Facemask inspection methods and standards

制 訂: 2020/10/17

(v1b)修訂: 2020/10/21

一.檢驗者裝備:戴口罩及手套

二.抽樣檢驗:依 CNS 2779〔計數值檢驗抽樣程序及抽樣表〕之正常檢驗單次抽樣計畫,

各檢驗項目之檢驗水準為特殊檢驗 S-2,允收品質水準為 4%。

三.檢驗項目:

No.	項目		標準	備註
1	尺寸	長度	17.5±0.8cm	
		寬度	9.3±0.8cm	
2	鼻夾內鋁線		是否有鋁線	
			外部需包覆完整	
			鋁線長度大於 9cm	
3	兩側鬆緊帶		應有彈性	
			不可鬆脫斷裂	
			強度大於 0.3Kgf	另外取樣拉力品不放回
4	外觀		乾燥	
			清潔	
			無破損	
5	數量		50 片/盒	

註:此為"Life Protection"要事,且為"Taiwan Can Help"臺灣國家名譽與工業水準證明, 特於本集團 MD 口罩檢查檢查標準列入「兩側鬆緊帶牢固,強度大於 0.3Kgf」之規 定,視同外科用醫療口罩捐贈,以符「警察及消防部門之救護救難任務之需」。

四.檢驗後標示

檢驗合格品,每箱側嘜右上角加蓋藍色墨印 QC PASS 章。

五.檢驗完成後製作 QC INSPECTION DATA

六.參考資料:

- 1.防疫衛材採購規範表。
- 2.醫用面(□)罩製造工廠品質管理指引(版本:108.06.20)。
- 3. CNS 2779 「計數值檢驗抽樣程序及抽樣表」。





